

VSSH:n hengityshalvausryhmien varautuminen mahdollisiin sähkökatkoksiin

- Astral-ventilaattoreissa on sisäinen akku kesto 8 h + ulkoinen akku 8 h. Lisäksi on varalla toinen Astral
- Aktiivikostuttimet Fisher&Paykel MR 850 ja MR 950 eivät toimi
 - Siirrytään Astraliin, jossa kalibroitu ns. matkaletkusto kostuttavan virusbakteerifiltterin kanssa (=HME)
- Nutrician ravintopumppu toimii akulla – 125ml / h nopeudella 20 h
 - Käsivarainen annosteluletkusto tarvittaessa käyttöön
- Laerdal LSU imulaite toimii akuilla 20 min täysillä suoritteilla
 - Kestää normaalisti lukuisia imukertoja
- Potilasnosturissa riittää akun virta useampaan siirtoon, vältettävä tarpeetonta käyttöä. Kesto muutamasta päivästä viikkoon.
- Sähkösätky ei toimi.
- Kompessori-ilmapatjojen toiminta (esimerkkinä CuroCell A4 -malli)
 1. Irrota letkut pumpusta painamalla molempien sivujen klipseistä ja samalla vetämällä.



2. Kiinnitä letkussa roikkuva tulppa letkun päähän. Lyhyen sähkökatkon aikana pumppuun ei tarvitse koskea ollenkaan. Patjan pumppu sulkee itse itsensä, eikä ilma pääse ulos.



- Mobiilikannettavat toimivat akuilla muutamia tunteja. Tiedonkulku turvattu.
- Medanets-”kapula” toimii akulla n. 1vrk täyteen ladattuna. Kirjaaminen turvattu.
- Työpuhelin toimii akulla joitain päiviä täyteen ladattuna.
- Hengityshalvausryhmien tulee huolehtia, että laitteiden akut ovat täyteen ladattuja.
- Jos sähkökatkos konkretisoituu, kirjaa katkoksen alkamisaika ja kesto ylös. Seuraa laitteiden akkujen täyttötilannetta.
- Jos sähkökatko pitkittyy, ota yhteys Hengitystukiyksikköön

10.10.2022 KY-L, WS

Kuvat: Olivia Nurminen