

Sukupuolihormoneja sitovan globuliinin tulostason lasku: P-Sukupuolihormoneja sitova globuliini (P-SHBG, 2737)			
Muutos tulee voimaan	5.8.2019		
Asian kuvaus	<p>Tykslabin käyttämän sukupuolihormoneja sitovan globuliinin määrittämenetelmän valmistaja (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Saksa) ilmoittaa, että määrittäksen tulostaso on noussut vähittäin usean vuoden ajanjakson kuluessa. Tulostason vähittäisen nousun syyksi on osoittautunut käytetyn kalibrintimateriaalin epästabiilisuus.</p> <p>Poikkeaman korjaamiseksi menetelmävalmistaja laskee määrittäksen tulostasoa noin 20 % 5.8.2019 alkaen. Korjauksen jälkeinen tulostaso on jäljitettävissä kansainväliseen NIBSC:n (The National Institute for Biological Standards and Control) 1st International Standard code 95/560-materiaaliin.</p> <p>Tutkimuksen viitealueet säilyvät ennallaan koska ne on määritetty ennen edellä mainittua tasoliukumaa.</p> <p>Tutkimuksen näytteenoton, -käsittelyn, säilytyksen ja lähetyksen ohjeistus säilyy ennallaan.</p> <p>Menetelmä: Immuno-elektrokemiluminometria (ECLIA)</p> <p>Tekotiheys: Arkisin</p>		
Tiedusteluihin vastaavat	Määrittäksen tekopaikka os 930, puh. (31)3 1930 Oyl Pertti Koskinen, puh. (31)31890 Skem Hanna-Mari Pallari, puh 050 313 7180		
Allekirjoitukset	Pertti Koskinen osastonylilääkäri Tyks Laboratorio- toimialue, Tykslab	Hanna-Mari Pallari sairaalakemisti Tyks Laboratorio- toimialue, Tykslab	Maria Raitakari ylilääkäri Tyks Laboratorio- toimialue, Tykslab
Jakelu	VSSHP yksiköt, Turun hyvinvointitoimiala, VSSHP:n alueen terveyskeskukset		