

## **Muutoksia VRE-näytteiden näytteenottovälineissä**

Siirrymme **2.5.2023** alkaen käyttämään VRE-näytteenottoputkena Tammer BioLabin valkokorkkista VRE-putkea, joka toimii samalla rikastavana putkena. **Näytteenottopakettiin kuuluu vain rikasteputkia (kuvat). Näytteenottotikkuina tulee käyttää erikseen hankittuja steriilejä pumpuli- tai nukkapäisiä näytteenottotikkuja, joita ei jätetä putkeen.**

Näytteenottovälineitä on saatavana 20 kpl ja 50 kpl paketteina Abakus-tilausnumeroilla 911529. Tilausnumero on sama molemmille pakkauskoille. Asiakkaan tulee tilatessa ilmoittaa, kumpaa pakkauskokoa haluaa.



Mikäli näytteitä ei voida lähettää Kliinisen mikrobiologian laboratorioon samana päivänä, ne voidaan inkuboida yön yli lämpökaapissa +35 °C:ssa. Tällöin tarraan merkitään "inkuboitu". Inkuboidut näytteet viljellään laboratoriossa suoraan maljalle, mikä nopeuttaa vastausten saamista.

Yksityiskohtainen kuvallinen näytteenotto-ohje on Hoito-ohjeet.fi -sivustolla [VRE ja ResGNS-seulonnan näytteenottokohdat](#). VRE-seulonnan näytteenottokohdat säilyvät ennallaan.

**Tiedustelut:**

Näytteiden ottamista koskevat: Sairaalahygieniyksikkö, p. (02) 313 2431

Kliinisen mikrobiologian laboratorio, p. (02) 313 3951

Kaisu Rantakokko-Jalava  
Osastonylilääkäri, palvelualuejohtaja  
Tyks laboratoriot  
Kliininen mikrobiologia