

Täydentävä tiedote: Muutoksia VRE-näytteiden näytteenottovälineissä

Olemme siirtyneet 2.5.2023 alkaen käyttämään VRE-näytteenottoputkena Tammer BioLabin valkokorkkista VRE-putkea, joka toimii samalla rikastavana putkena. Näytteenottopakettiin kuuluu vain rikasteputkia (kuvat). Näytteenottotikkuina tulee käyttää erikseen hankittuja steriilejä pumpuli- tai nukkapäisiä näytteenottotikkuja. VARHA:n yksiköissä näytteenottotikuksi suositellaan tilamaan puuvartisia steriilejä näytteenottotikkuja (452248).

Näytteenottovälineitä on saatavana 20 kpl:een paketteina Abakus-tilausnumeroilla 911529. VRE-rikastusputket vaativat jääkaappisäilytyksen. Mikäli yksikössä ei ole kylmäsäilytysmahdollisuutta, VRE-näytteet voidaan edelleen ottaa myös eSwab-putkeen. Samoin potilaiden itse suorittamaan ulostenäytteenottoon voidaan edelleen käyttää eSwab-putkea.



Näytteenotto-ohje Tammer BioLabin näyteputki

Näytteenoton jälkeen näytteenottotikkua huljutellaan putkessa nestepinnan alapuolella, minkä jälkeen se "niistetään" kuivaksi painaen kevyesti putken sisäpintaa vasten. Näytteenottotikkua ei katkaista, **eikä sitä saa jättää putkeen**. Putken korkki tulee sulkea tiivisti. Mikäli näytteeksi otetaan virtsaa, sitä voi siirtää putkeen suunnilleen saman verran kuin putkessa on rikastuslientä.

Mikäli näytteitä ei voida lähettää Kliinisen mikrobiologian laboratorioon samana päivänä, ne voidaan säilyttää jääkaappilämpötilassa tai inkuboida yön yli lämpökaapissa +35 °C:ssa. Yön yli +35 °C:ssa inkuboituihin näytteisiin merkitään tarroihin "inkuboitu". Inkuboidut näytteet viljellään laboratoriossa suoraan maljalle, mikä nopeuttaa vastausten saamista. Näytteet voi lähettää Kliinisen mikrobiologian laboratorioon huoneenlämmössä.

Yksityiskohtainen kuvallinen näytteenotto-ohje on Hoito-ohjeet.fi -sivustolla [VRE ja ResGNS-seulonnan näytteenottokohdat](#). VRE-seulonnan näytteenottokohdat säilyvät ennallaan.

Tiedustelut:

Näytteiden ottamista koskevat:

Sairaalahygieneiyksikkö, p. (02) 313 2431

Kliinisen mikrobiologian laboratorio, p. (02) 313 3951

Yl Kaisu Rantakokko-Jalava, p. 050 4637270

Kaisu Rantakokko-Jalava
Yl, palvelualuejohtaja
Kliininen mikrobiologia
Tyks laboratoriot